

BOLSAS DE UROSTOMIA COM PLACA



MANUAL DE INSTRUÇÕES

IMPORTADOR:

Imbrasul Import e Dist Prod Hosp Ltda
CNPJ 10.938.962/0001-40
Rua Comendador Rafael Mazza ,1115
(53) 3025.4445/3025.4451
(53) 98428.6552/99166.7706
imbrasul@imbrasul.com.br

FABRICANTE:

Yancheng Diling Medical Inst. Co.,Ltd.
Registro ANVISA:
80622660007
RESP.TÉCNICO:
Patrícia K.Gomes - CRF 5081

Indicação de uso/finalidade

As bolsas de urostomia Master Win® destinam-se à coleta de urina em pacientes com urostomia.

Princípios de funcionamento

A urostomia é um procedimento cirúrgico que cria uma abertura, chamada estoma, no abdômen para permitir a saída da urina quando a bexiga não pode funcionar normalmente. A urina é coletada por uma bolsa de urostomia fixada ao estoma.

Modo de uso

A aplicação cuidadosa das bolsas ajudará a proteger a pele periestoma contra a irritação causada pelos efluentes:

- 1) Assegurar-se de que a pele periestoma esteja limpa, seca e livre de qualquer substância oleosa, sabão ou solvente que possa prejudicar a aderência. Limpar a área com água e sabão e secar completamente, o suporte adesivo flexível só adere à pele seca.
- 2) Não é necessário nem recomendado o uso de adesivos cirúrgicos adicionais para segurar a bolsa.
- 3) Não é necessário retirar a bolsa de urostomia durante o banho de banheira, chuveiro ou piscina.

Contudo, após o contato com a água o suporte adesivo e a parte de trás da bolsa devem ser secos com uma toalha.

Modo de uso

4) Pequenas porções da barreira protetora podem permanecer na pele durante o processo de troca da bolsa. Não é necessário remover completamente todo o resíduo.

Preparação para a aplicação

- 1) Medir o tamanho do estoma com o guia de medida que acompanha o produto.
- 2) Retirar o plástico protetor do disco.
- 3) **IMPORTANTE:** Antes de recortar o disco, separar as paredes da frente e de trás da bolsa, a fim de evitar cortar a parede frontal.
- 4) Recortar o orifício inicial ligeiramente maior que o diâmetro do estoma, usando o guia de medidas impresso no papel aderente.
- 5) Remover o papel aderente do disco protetor de pele.
- 6) Desprender o papel que protege o suporte adesivo, dobrando as pregas laterais para trás.

NÃO remover completamente o papel das bordas laterais, por enquanto.

Aplicação da bolsa

- 1) Segurar a bolsa pelos dois lados e posicionar o disco com a abertura sobre o estoma.
- 2) Pressionar o disco contra a pele, prestando particular atenção à área periestoma.
- 3) Pressionar o suporte adesivo contra a pele, assegurando-se de que ele fique liso e sem rugas.
- 4) Retirar o restante do papel que protege as bordas laterais e alisá-las sobre a pele. A bolsa pode permanecer aplicada enquanto estiver confortável e segura.

Válvula de drenagem

Esvazie a bolsa sempre que necessário. Lave o bico da válvula com água, após esvaziar a bolsa.

Remoção da bolsa

Começando pela parte superior, pressionar levemente a pele adjacente com uma das mãos e remover cuidadosamente a barreira protetora da pele com a outra mão, até retirar completamente a bolsa.

Composição

As bolsas de urostomia Master Win ® são constituídas de uma peça com barreira cutânea hidrocolóide.

Bolsa: membrana altamente resistente, revestida de película de EVA ou TPE;

Barreira da pele: hidrocolóide+tecido-não-tecido (adesivo microporoso removível);

Forro interno: polietileno ou tecido-não-tecido;

Válvula: polietileno e silicone.

Condições de armazenamento

As bolsas de urostomia Master Win devem ser armazenadas em local seco com temperatura ambiente. Não devem ser armazenadas em ambientes com temperatura superior a 40°C, úmido ou geladeira.

Observações

Não utilizar desinfetante, sabão ou detergente para limpar a pele ao redor do estoma. Não é necessário nem recomendado o uso de adesivos cirúrgicos adicionais para segurar a bolsa. Não é necessário retirar a bolsa de urostomia durante o banho de banheira, chuveiro ou piscina.

Observações

Tricomizar a área localizada em torno do estoma, ou a bolsa de urostomia para que haja boa adesão à pele e para que a ocorrência de foliculíte seja evitada. Limpar o estoma de dentro para fora somente com água morna.

Produto não estéril.

Validade 5 anos.