



Imbrasul
IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Master Win®

GUIA DO USUÁRIO

Bolsa de Colostomia MASTER WIN® de duas peças


Siga o passo a passo para uma aplicação segura, confortável e eficaz.

1



Limpe a pele ao redor do estoma com água morna ou soro fisiológico.

2

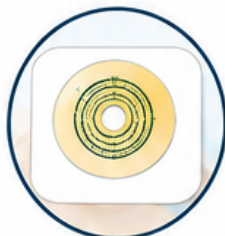

Corte o orifício na placa de acordo com o tamanho e formato do estoma.

3



Coloque gaze sobre o estoma para impedir a saída de exsudatos durante a fixação da placa.

4



Retire a película de proteção do adesivo da placa. Coloque a placa sobre a área do estoma e pressione-a de baixo para cima para deixá-la completamente grudada à pele.

5



Faça o encaixe da bolsa sobre o flange da placa, pressionando os encaixes com os dedos de baixo para cima. A bolsa vai ser fixada com segurança na placa quando ouvir um som de clique. Puxe a bolsa para ter certeza de que está fixada.

6



Remova a bolsa puxando o guia de remoção no flange.

7



Para remover a placa, pressione a pele com uma mão e com a outra retire-a da pele delicadamente. Se isto for difícil, coloque um pouco de água morna e espere alguns minutos e então retire a placa.

RECOMENDAÇÕES DE USO DA BOLSA DE COLOSTOMIA:



1. Antes de fixar a placa, certifique-se de que a área ao redor do estoma esteja seca e limpa. Pressionar a placa por alguns segundos após a fixação pode ajudar a aumentar a capacidade adesiva.



2. Raspar o cabelo se houver muito cabelo em torno do estoma, ou a bolsa de colostomia não ficará bem aderida à pele e ocorrerá foliculite.



3. O orifício da placa deve ser de 1 a 1,5mm maior que o estoma, caso contrário é possível a ocorrência de sangramento das mucosas ou maceração.



4. Se houver dilatação da bolsa de colostomia, alguns pequenos orifícios podem ser feitos. Após ser furada, sugerimos o uso de filtro de carvão ativado.



5. A bolsa de colostomia não pode ser reciclada.



6. A bolsa de colostomia não pode ser jogada em vaso sanitário e em tubulação cloacal, nem descartada em qualquer local à sua vontade. Por favor, preste atenção na proteção do meio ambiente.



7. Pacientes alérgicos ao adesivo devem usá-la com cautela.



CUIDAR BEM DO SEU ESTOMA É
CUIDAR DA SUA **QUALIDADE DE VIDA.**



Em caso de dúvidas,
consulte um profissional
de saúde.