



Imbrasul
IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Master Win®

GUIA DO USUÁRIO

Bolsa de Colostomia MASTER WIN® de uma peça

Siga o passo a passo para uma aplicação segura, confortável e eficaz.

1



Limpe a pele ao redor do estoma com água morna ou soro fisiológico.

2



Corte o orifício na placa de acordo com o tamanho e formato do estoma.

3



Coloque gaze sobre o estoma para impedir a saída de exsudatos durante a fixação da placa.

4



Abra o clipe.

5




Feche a bolsa de colostomia com o clipe.

6



Retire a película de proteção do adesivo.

7

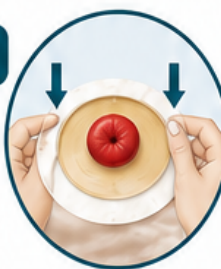

Faça entrar um pouco de ar dentro da bolsa, no caso das paredes estarem grudadas. Coloque a placa na área do estoma e pressione-a de baixo para cima para deixá-la completamente grudada com a pele.

8



Abra a extremidade da bolsa de colostomia para eliminar o excremento no vaso sanitário. Limpe e seque a bolsa para o próximo uso.

ATENÇÃO:



A bolsa de colostomia é usada apenas por pacientes ostomizados.



Normalmente a placa pode ser usada de 5 a 7 dias, porém a capacidade adesiva será afetada pelo uso contínuo.



Quando a bolsa estiver cheia de ar, um pequeno orifício pode ser feito. Sugerimos o uso de filtro de carvão ativado.



A bolsa de colostomia não pode ser reciclada.



A bolsa de colostomia não pode ser jogada em vaso sanitário e em tubulação cloacal, nem descartada em qualquer local à sua vontade. Por favor, preste atenção na proteção do meio ambiente.



Pacientes alérgicos ao adesivo deve usá-la com cautela.



CUIDAR BEM DO SEU ESTOMA É
CUIDAR DA SUA **QUALIDADE DE VIDA.**



Em caso de dúvidas,
consulte um profissional
de saúde.



(53) 3025.4445



(53) 98428.6552



(53) 99166.7706



www.imbrasul.com.br